

# DentaPort ZX Einstellungstabelle / Basic Setting Table

Die angegebenen Werte sind reine Anhaltswerte und können natürlich individuellen Bedürfnissen angeglichen werden. J. Morita übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Werte.

The figures in the tables below are suggested values only, they can of course be individually adjusted.

J. Morita does not guarantee the correctness of the data.



## ZX-System (J. Morita)

Memory	Torque	U./min.: rpm	Feilen; Files
M1	5	250	06/30, 08/30, 12/30
M2	2	250	04/20, 04/25, 04/30
M3	1	250	02/20

## ENDOWAVE (J. Morita)

Memory	Torque	U./min.: rpm	Feilen; Files
M1	3	400-600	06/20, 06/25, 06/30, 06/40, 08/35
M2	3	400-600	04/15, 04/20, 04/25, 04/30, 06/20, 06/25
M3	2	400-600	02/15, 02/20, 02/25

## PROTAPER

Memory	Torque	U./min.: rpm	Feilen; Files
M1	4	250	S2, F1 (auch SX und S1, wenn das Drehmoment ausreicht/Provided sufficient torque also SX and S1 may be used)
M2	6	250	F2
M3	7	250	F3 (bei Bedarf; if necessary: SX, S1)

## System GT

Memory	Torque	U./min.: rpm	Feilen; Files
M1	9	400	10/40 und GT-Accessory Files (12/35, 12/50, 12/70)
M2	4	300	Alle nicht extra aufgezählten GT-Feilen/All other GT-Files not seperately mentioned
M3	2	300	4/20, 4/30, 6/20

## Mtwo

Memory	Torque	U./min.: rpm	Feilen; Files
M1	4	250	04/10, 05/15, 05/30, 04/35, 04/40
M2	6	250	06/20, 06/25, 07/25

Bitte wenden...  
Please turn...

Diese Tabelle wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Christoph Huhn, Dessau, erstellt (Kontakt: [www.wurzelkanal.de](http://www.wurzelkanal.de))  
 This table was made up in cooperation with Dr. Christoph Huhn, Dessau (Contact: [www.wurzelkanal.de](http://www.wurzelkanal.de))

#### ProFile & Profile O. S.

Memory	Torque	U/min.; rpm	Feilen; Files
M1	6	250	04/45, 04/60, 04/90, 06/35, 06/40, OS 3 bis OS 6
M2	3	250	02/35, 02/40, 04/30, 04/35, 04/40, 06/15, 06/20, 06/25, 06/30, OS2
M3	1	250	02/15, 02/20, 02/25, 02/30, 04/15, 04/20, 04/25, OS1

#### Flexmaster

Memory	Torque	U/min.; rpm	Feilen; Files
M1	4	250	02/45, 02/50, 02/60, 02/70, 04/40, 06/30, 06/35, 06/40, IntroFile
M2	2	250	02/30, 02/35, 02/40, 04/25, 04/30, 04/35, 06/20, 06/25
M3	1	250	02/15, 02/20, 02/25, 04/20

#### RaCe

Memory	Torque	U/min.; rpm	Feilen; Files
M1	5	500	08/35, 10/40
M2	2	500	02/35, 04/30, 02/40, 06/30
M3	1	300	02/25, 02/30, 04/25

#### Hero

Memory	Torque	U/min.; rpm	Feilen; Files
M1	3	250	04/30, 06/30
M2	2	250	02/35, 02/40, 04/20, 04/25, 06/20, 06/25
M3	1	250	02/20, 02/25, 02/30

#### K3

Memory	Torque	U/min.; rpm	Feilen; Files
M1	7	300	04/45, 04/50, 04/55, 04/60, 06/35, 06/40, 08/25, 10/25, 12/25
M2	3	300	02/35, 02/40, 04/30, 04/35, 04/40, 06/15, 06/20, 06/25, 06/30
M3	1	250	02/15, 02/20, 02/25, 02/30, 04/15, 04/20, 04/25

